


medical line



**ORLETT**

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

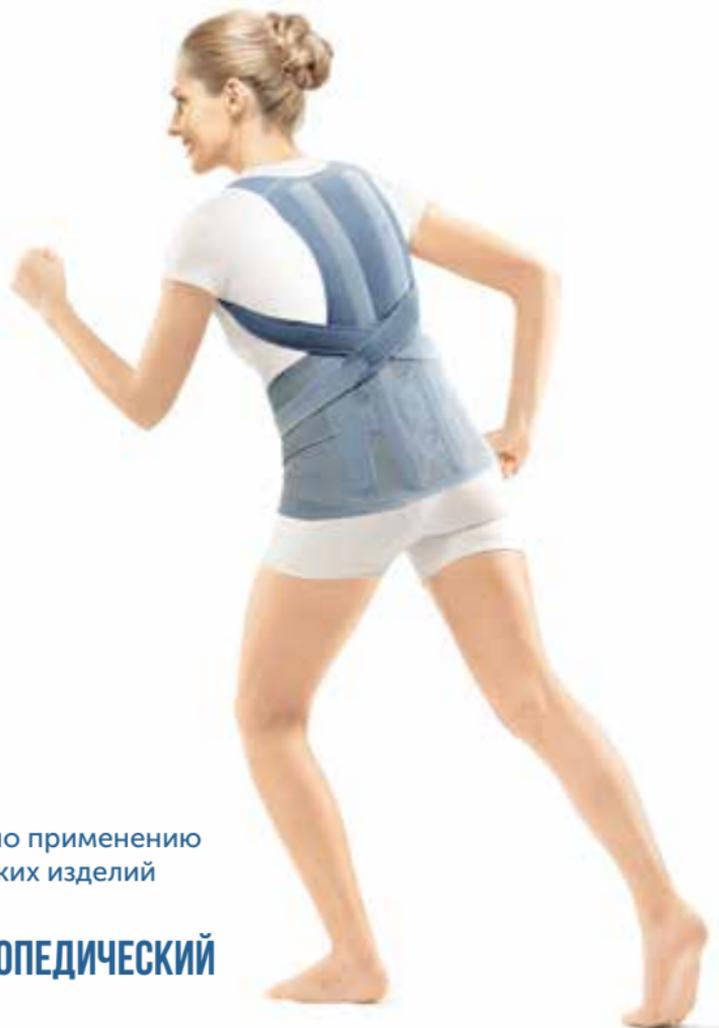

Инструкция по применению  
ортопедических изделий

**КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ**

**BS-222(1)**

[WWW.ORLETT.RU](http://WWW.ORLETT.RU)

## **СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

---

Грудопоясничный модуль ORLETT, арт. BS-222(1), является составной частью модульной системы. Модуль может использоваться вместе с корсетом BS-222 стандартной или высокой версий, для стабилизации и разгрузки грудопоясничного отдела позвоночника. Также модуль может использоваться в составе полного комплекта модульной системы для полной фиксации грудопоясничного отдела позвоночника.

Отпускается без рецепта.

## **ВНИМАНИЕ!**

---

Грудопоясничный модуль не может использоваться отдельно от корсета.

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

---

- люмбаго;
- ишиас;
- дегенеративные заболевания позвоночника;
- мышечные атонии;
- до- и послеоперационное лечение;
- грыжи дисков;
- спондилоартроз;
- спондилолизис.

## **РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ**

---

Режим и сроки ношения корсета назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

## **ПРОТИВПОКАЗАНИЯ**

---

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойно-септические заболевания кожи в области применения корсета.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Цифры на рис. 1, 2, 3 соответствуют следующим элементам конструкции:

- Фиксирующая зона корсета (1).
- Грудопоясничный модуль корсета с застежками микро Велкро с изнаночной стороны (2).
- Дополнительные фиксирующие ремни (3).

Модульная система собирается на ровной гладкой поверхности.

1. Расправьте корсет изнаночной стороной вверх (рис. 2).
2. С помощью застежек микро Велкро присоедините грудопоясничный модуль к корсету.

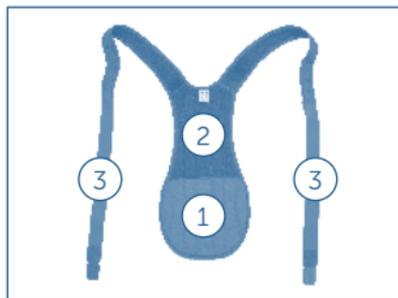


рис. 1



рис. 2

**ВАЖНО!** Металлические ребра жесткости корсета и грудопоясничного модуля должны совпадать друг с другом.



рис. 3



рис. 4

## ПРАВИЛА ПОДБОРА

---

Размер универсальный.

## ПРАВИЛА УХОДА

---

Для поддержания функциональных свойств полотна необходим регулярный уход за изделием. Рекомендуется стирать Ваше изделие после 3-5 применений. Машинная стирка в деликатном режиме при температуре не выше 30°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



## **СОСТАВ**

32% сталь, 26% полиуретан, 23% полиамид, 9% полиэстер, 8% хлопок, 2% эластан.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

Корсет утилизировать с бытовым мусором.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

Срок годности не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корсета. Не допускается эксплуатация поврежденного корсета.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Ортопедическое изделие арт. BS-222(1), инструкция по применению.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА  
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Изделия протезно-ортопедические: ортезы на верхние конечности, корсеты ортопедические, корректоры осанки, реклинаторы: корсет ортопедический, арт. BS-222. Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 17.12.2021 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

**Производитель:** Рехард Технолджис ГмбХ, Германия, Rehard Technologies GmbH, 10785 Berlin, Potsdamer Str. 92, Germany.

**Место производства:** PRIM, S.A., C/Yolanda González 15, P.I. 1 28938 Móstoles. Madrid, Spain.

**Импортер/уполномоченный представитель в РФ:** ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.



