



ORTMANN®

DER ARZT FÜR IHRE FÜSSE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ-ПЕЛОТ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ (ЗАЩИЩАЮЩИЙ)

FORMAN Gel

Арт. F-00043-01B; 02B



Мягкий, комфортный гелевый пелот FORMAN сделан из специального полимерного геля TRIBLOCK, безопасного для кожи и не вызывающего аллергии. Подушечка прочно крепится на ноге долговечной трикотажной эластичной манжетой. Для использования изделия на правой и левой ногах манжету выворачивают наизнанку. При постоянном использовании гелевые пелоты FORMAN помогают быстро и эффективно устранить болевые ощущения и дискомфорт в чувствительных участках стопы при натоптышах, мозолях, потертостях, воспалении кони и на ранних стадиях Hallux valgus («косточки» на ногах при отклонении большого пальца наружу). Пелот переднего отдела стопы FORMAN предназначен для многоразового применения во всех типах обуви и идеально подходит для чувствительной кони.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- травмы и деформации плюснофаланговых суставов;
- поперечная распластанность стоп;
- начальная и средняя степени Hallux valgus (отклонение большого пальца стопы наружу);
- натоптыши и мозоли в основании пальцев;
- трещины;
- потертости;
- идеально подходит для чувствительной кони;
- предназначен для многоразового применения во всех типах обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

эластичную манжету надевают на область плюснофаланговых суставов, располагая большой палец в меньшей части ступни. При этом пелот должен ровно располагаться под основанием всех пальцев.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- защита от контакта с обувью;
- эффективное смягчение кони в области контакта с полом;
- гелевый пелот защищает передний отдел стопы от ударных нагрузок;
- мягкая и эластичная манжета эффективно уменьшает боль и дискомфорт в стопах, не препятствуя кровотоку.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

не использовать при открытых и незаживающих ранах.

СОСТАВ:

трикотажная манжета с разделителем, внутри которой вставлена гелевая прокладка. Гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют коню и способствуют размягчению мозолей.

УХОД:

Манжету, не вынимая подушечки, периодически стирают в теплой воде с детским мылом, после чего сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

30 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:

М 8 см, L 10 см.



ORTMANN®

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

утилизация с бытовым мусором. Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выделены.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Соблюдения мер безопасности не требуется. Отпускается без рецепта.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

изделия ORTMANN должны храниться при комнатной температуре в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

СРОК ГОДНОСТИ:

не установлен.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.



Товар является медицинским изделием. Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09970 от 21.06.2011 г. выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, срок действия не ограничен. Декларация о соответствии № РОСС DE.ME20.Д01711 (с 27.06.2014 г. по 26.06.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертиформ ВНИИ-МАШ».

Изготовитель: «ФРЕСНО ИНТЕРНЕШНЛ 2006, С.А.», Испания, Тейа (Барселона), Локал 13 08329, Полигано Индастриал Бувида, Индастриа 4.

Импортер: ООО «Орто Медикал Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Нрасногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИНАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skil@nkamed.ru.