

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



Инструкция по применению ортопедических изделий

Medical Line



Корсет ортопедический
IBS-3006
IBS-2004



Свойства товара (оказываемые эффекты):

Корсет ортопедический Orlett с ребрами жесткости (4,6,8, в зависимости от размера) и дополнительными затяжкам, арт. IBS-3006 и корсет ортопедический Orlett с четырьмя ребрами жесткости из стандартной сетки, арт. IBS-2004 применяются при необходимости средней степени фиксации поясничного отдела позвоночника (Th12-S1), стабилизации связочно-суставного аппарата, устранении дисбаланса паравертебральных мышц в поясничном отделе и уменьшении нагрузки на мышцы поясницы.

Показания к применению корсета ортопедического Orlett, арт. IBS-3006:

- острый и хронический болевой синдром в пояснице на фоне:
 - радикулита, корешкового синдрома;
 - локализованного остеохондроза;
 - спондилоартрозов и спондилитов;
 - грыж и протрузий межпозвонковых дисков;
 - смещений позвонков;
- функциональная терапия при болях в пояснице в комплексе с мануальной терапией, массажем, медикаментозными методами лечения;
- профилактика травм и обострения заболеваний поясницы при вертикальных нагрузках (статических и динамических);
- закрепление достигнутого эффекта после мануальной терапии и лечебной гимнастики.

Показания к применению корсета ортопедического Orlett, арт. IBS-2004:

- начальные проявления болевого синдрома в пояснице на фоне:
 - напряжения мышц и мышечного дисбаланса;
 - функционального сколиоза;
 - функционального укорочения одной из нижних конечностей;
 - смещений позвонков (спондилолистез I степени);
- позднесрочная реабилитация после травм и операций на поясничном отделе позвоночника;

- функциональная терапия в комплексе с мануальной терапией, массажем, медикаментозными методами лечения при незначительных поражениях;
- опущение внутренних органов брюшной полости;
- профилактика травм и заболеваний поясницы при работе с тяжестями;
- длительные статические и динамические нагрузки на поясничный отдел, возникающие по роду повседневной деятельности.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения корсетов назначает лечащий врач.

Противопоказания:

- беременность;
- невправимые грыжи брюшной стенки, свищи;
- диафрагмальные грыжи;
- синдром портальной гипертензии.

Предупреждения:

- в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения корсетов необходима консультация лечащего врача;
- людям с особо чувствительной кожей следует надевать корсеты на нижнее белье, плотно прилегающее к телу;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование корсетов и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Конструкция корсета IBS-3006:

Корсет ортопедический Orlett с ребрами жесткости (4,6,8, в зависимости от размера) и дополнительными затяжками, арт. IBS-3006 состоит из следующих элементов (рис. 1):

1. Фиксирующий пояс из нерастяжимой плотной сетки с застежкой-липучкой «Велкро».
2. Поддерживающие ремни (подтяжки).
3. Дополнительные затяжки (ленты усиления).



Рис. 1

Порядок надевания:

Корсет рекомендуется одевать лежа на спине.

1. Застегнуть фиксирующий пояс с захватом на 2-3 см гребней подвздошных костей.
2. Зафиксировать подтяжки:
 - стандартным способом (рис. 1);
 - с легким реклинирующим эффектом для улучшения осанки (пропустить подтяжки под мышками и закрепить их сзади на корсете) (рис. 2);
3. Затянуть и застегнуть дополнительные затяжки (ленты усиления).



Рис. 2

Конструкция корсета IBS-2004:

Корсет ортопедический Orlett с четырьмя ребрами жесткости из стандартной сетки, арт. IBS-2004 состоит из следующих элементов (рис. 3):

1. Фиксирующий пояс из малорастяжимой плотной сетки с застежкой-липучкой «Велкро».
2. Дополнительные затяжки (ленты усиления).

Порядок надевания:

Корсет рекомендуется одевать лежа на спине.

1. Застегнуть фиксирующий пояс с захватом на 2-3 см гребней подвздошных костей.
2. Затянуть и застегнуть дополнительные затяжки (ленты усиления).

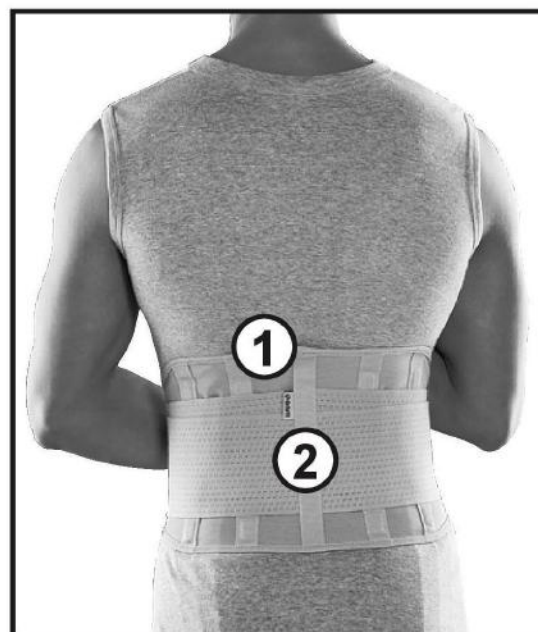


Рис. 3

Правила подбора:

Для корректного подбора корсета ортопедического Orlett, арт. IBS-3006 и IBS-2004 необходимо измерить сантиметровой лентой (плотно, но не утягивая) окружность талии и бедер (рис. 4).

Согласно полученным результатам подобрать корсет Orlett по таблице подбора размеров.

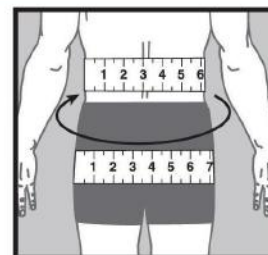


Рис. 4

Таблица подбора размеров:

Корсеты ортопедические Orlett, арт.: IBS-3006, IBS-2004

Размер (по объему)	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам (см)
XS	до 70
S	70-85
M	85-97
L	97-105
XL	105-115
XXL	более 115

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корсет. Важно, чтобы корсет был удобен.

Правила ухода:

Ручная стирка при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Не применять машинную стирку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Состав изделия:

Корсета ортопедического Orlett IBS-3006: 6% полиуретановый поролон, 56% нейлон, 16% полиэстер, 22% спандекс.

Корсета ортопедического Orlett IBS-2004: 3% хлопок, 6% полиуретановый поролон, 56% нейлон, 13% полиэстер, 22% спандекс.

Условия хранения:

Корсеты должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.



Условия утилизации:

Корсеты утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности:

Срок годности не установлен.

Возможность использования корсетов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсетов без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корсетов. Не допускается эксплуатация поврежденного корсета.

Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. IBS-3006, инструкция по применению.

Ортопедическое изделие арт. IBS-2004, инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Зарегистрировано в ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
РУ № ФСЗ 2011/09549 от 12.04.2011 г.

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ

Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе, 27.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я №60.