



Активные захваты

12405/26, 12444



Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик активных захватов 12405/26 и 12444.

1. Описание и работа

1.1 Назначение:

Активные захваты 12405/26 и 12444 предназначены для людей с ограниченными двигательными функциями. Позволяют, не вставая с места, перемещать небольшие предметы.

1.2 Технические характеристики:

| | 12405/26 | 12444 |
|------------------|---|----------------------|
| цвет | пластмассовые детали выполнены в сером цвете; прорезиненные - в оранжевом | черный и красный |
| материал | алюминий, пластмасса, резина | алюминий, пластмасса |
| длина (см) | 70 | 83 |
| ширина (см) | 20 | 13 |
| глубина (см) | 14 | 9 |
| вес изделия (кг) | 0,2 | 0,2 |

1.3 Упаковка:

Комплектация: активный захват, полиэтиленовая упаковка, руководство по эксплуатации.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Перед началом эксплуатации проверьте все части изделия на наличие трещин.
- Не пытайтесь поднимать тяжелые предметы с помощью активного захвата. Это может привести к повреждению рук, запястий или изделия.

2.2 Порядок работы:

1. Вытащите изделие из упаковки. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
2. Нажмите на курок, когда держатели будут находиться вокруг предмета, который необходимо поднять. Нижний держатель захвата 12405/26 оснащен магнитом для поднятия легких металлических предметов.

3. Техническое обслуживание

Уход за изделием следует проводить водой и не абразивными чистящими средствами. Затем тщательно высушить.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской уточняйте на сайте www.sims2.ru

Серийный номер_____

Дата продажи_____

Подпись продавца_____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Активный захват 12405/26 и 12444

Производитель: VALENTINE INTERNATIONAL LTD,
8th Floor, No 149, Sec. 2, Ta Tung Road, 221 Hsichih District, New Taipei
City, Taiwan

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б,
ком. с 15 по 18
Тел.: (495) 792-31-90; (800) 200-31-90;
www.sims2.ru

| | |
|----------------|--|
| Номер артикула | |
| Дата продажи | |

Подпись продавца _____ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.
Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.
Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.



** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru